

カメラが、滅菌により痛まないで、故障が少ない。  
カメラのメンテナンスの手間と費用を削減

HEIWA



① 包装より取り出す



③

カメラを入れる。  
矢印の方向に、挟み込むようにして  
大きく口を広げ挿入する



④

コードにそって、袋を広げる



⑤

カプラをカメラに取り付ける



⑥

完成



スコープ（硬性鏡）  
の装着は、矢印の部分  
押し下げる。

商品名	カタログ番号	1箱の人数	定価単価	メディエコード	JANコード
完全密封式カメラカバー	DCC8007	40枚/箱	¥2,380	T508222	4560279000225

since 1963

株式会社平和医療器械

東京：03-5966-4388 山口：0835-22-3658  
宇部：0836-44-5021 www.heiwairyo.co.jp

HP：“平和医療”で、検索可

製造販売業許可番号 35B2X10001