

取扱説明書



洗浄吸引プローブセット

LISS4012

特 徴

ローコスト

軽 量

ピストン部が大口径の為詰まらない。
洗浄水の出が良い。

STEP 1

リユーザブル吸引洗浄プローブを
取り付けます。 しっかり奥まで差し込みます

※リユーザブルプローブ

LISS4007



STEP 2

洗浄水のバッグに、
洗浄水のチューブを差し込みます。

白 - 吸引 青 - 洗浄水



STEP 3

吸引用チューブを吸引口に取り付けます。
赤



発売元

医療と共に歩む

創業四十周年 / since 1963

株式会社 平和医療器械

☎ 0835-22-3658 FAX 0835-22-3678

<http://www.heiwairyo.co.jp/>

本社 山口県防府市戎町 2-4-37

東京出張所 03-5966-4388