


## ハイワホルダー取扱説明書

**③** 固定位置を決定し、  
Cをしめつければ、  
関節部分すべてが  
固定できます。

**②** アダプターを選択し、Bを押しながら  
アダプターを差し込みます。

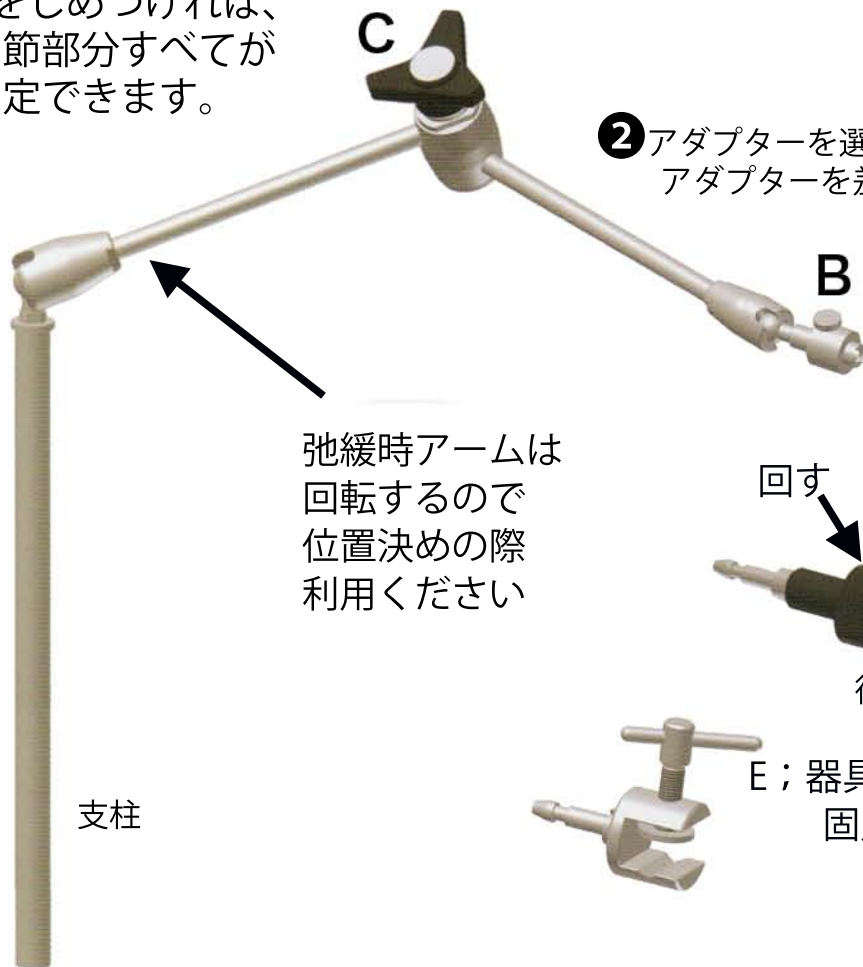

回す  
D; スコープ等の固定

径2.7mm~10mm可

支柱

E; 器具等の  
固定ネジ



**①** レール固定金具ACT13を手術台のレールに  
取り付け、支柱を差し込み Aを締め付け  
固定します。

滅菌はオートクレーブ<sup>®</sup>、EOG、ステラット<sup>®</sup>が可能です。  
使用後は十分に洗浄を行いよく乾燥させてください。  
洗浄の際目の粗い磨き粉や金属ウールにて表面を磨かないでください。